

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj **BeautyRelax BR-2954**  
**AIRFLOW REHABBODY LUXURY**





## OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	5
OBSAH BALENÍ	16
HLAVNÍ VÝHODY	16
POPIS PŘÍSTROJE	17
POPIS OVLADAČE	18
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	19
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	20
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ	21
CERTIFIKACE	21
EU DISTRIBUTOR	21
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	22

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



## **PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE**

Masážní přístroj BeautyRelax Airflow RehabBody Luxury vám poskytne příjemnou uvolňující relaxaci celého těla. Využívá vysoce účinné masážní metody shiatsu, vzduchové a vibrační masáže. Úleva od bolesti se dostaví okamžitě! Konstrukce přístroje umožňuje masáž celého těla v jeden okamžik. Ideální pro masáž krku, ramen, zad a nohou. BeautyRelax Airflow RehabBody Luxury nabízí 3 úrovně nastavení intenzity masáže. K dispozici jsou na výběr 3 automatické masážní programy. Masážní podložku je možné snadno složit. Rozměry: 170x60cm.

## **SHIATSU MASÁŽ V OBLASTI KRČNÍ PÁTEŘE**

Shiatsu je japonská masážní technika, která pracuje s tlakem na akupresurní body na těle. Tato metoda masáže je známá pro své potenciální pozitivní vlivy na celkové zdraví a pohodu.

### **Uvolnění svalového napětí**

Uvolnění svalového napětí, což může být užitečné pro ty, kteří trpí bolestmi ramen nebo krku a mají velmi zatuhlé svaly v oblasti krční páteře.

### **Zlepšení krevní cirkulace**

Shiatsu může podporovat zlepšení cirkulace krve, což má za následek lepší dodávku kyslíku a živin do tkání a urychlení odvodu odpadních látek.

### **Snížení stresu a úzkosti**

Masáž snižuje hladinu stresu a úzkosti. Shiatsu není výjimkou a může být považováno za relaxační techniku.

### **Podpora imunitního systému**

Někteří věří, že pravidelná shiatsu masáž může posílit imunitní systém tím, že podporuje zdravý tok energie v těle a zlepšuje celkové pohody.

### **Podpora rovnováhy emocí**

Shiatsu má také pověst, že může pomoci při udržování rovnováhy emocí a podporovat duševní pohodu.

### **Zlepšení kvality spánku**

U některých jednotlivců může mít shiatsu příznivý vliv na kvalitu spánku tím, že uvolňuje napětí a podporuje relaxaci.

## **MASÁŽ POMOCÍ VZDUCHOVÝCH POLŠTÁŘKŮ**

Vzduchová masáž využívá tlakové vzdušné polštářky k ovlivnění tělesných tkání. Tato metoda masáže může mít několik příznivých účinků na tělo, zejména pokud je prováděna správně a v souladu s potřebami jednotlivce.

### **Zlepšení krevní cirkulace**

Tlak vzduchových polštářků na tkáň může pomoci zlepšit cirkulaci krve. To může vést ke zvýšení dodávky kyslíku a živin do tkání a k urychlení odvodu odpadních látek.

### **Uvolnění svalového napětí**

Masáž s vzduchovými polštářky může pomoci uvolnit svalové napětí a redukovat stres ve svalech. Tím může přispět k celkovému uvolnění a pohodě.

**Podpora lymfatického systému**

Mechanické pohyby vzduchových polštářků významně podporují činnost lymfatického systému. To je důležité pro odplavení toxických látek a zlepšení imunitního systému.

**Zmírnění bolesti a nepohodlí**

Vzduchová masáž může být účinná při zmírňování bolesti spojené s určitými stavy, jako jsou svalová napětí, artritida nebo bolesti zad.

**Relaxace a snížení stresu**

Podobně jako jiné formy masáže, vzduchová masáž může přispět k celkovému pocitu relaxace a snížení stresu. To může mít pozitivní vliv na psychickou pohodu.

**VIBRAČNÍ MASÁŽ**

Vibrační masáž, známá také jako vibrace nebo vibrální terapie, využívá vibrace nebo oscilace k ovlivnění měkkých tkání těla. Tato forma masáže může mít několik zdravotních benefitů, i když je vždy důležité vzít v úvahu individuální potřeby a reakce každé osoby.

**Uvolnění svalového napětí**

Vibrace mohou pomoci uvolnit svalové napětí a snížit tuhost svalů. Tím mohou přispět k celkovému pohodlí a uvolnění.


**Zlepšení krevní cirkulace**

Vibrační masáž může podporovat zlepšení cirkulace krve. To může zvýšit průtok krve do tkání, zlepšit kyslíkový přísun a urychlit odvod odpadních látek.

**Relaxace a snížení Stresu**

Vibrační masáž může přispět k celkovému pocitu relaxace a snížení stresu. Vibrace mohou stimulovat nervový systém, což může mít pozitivní vliv na psychickou pohodu.



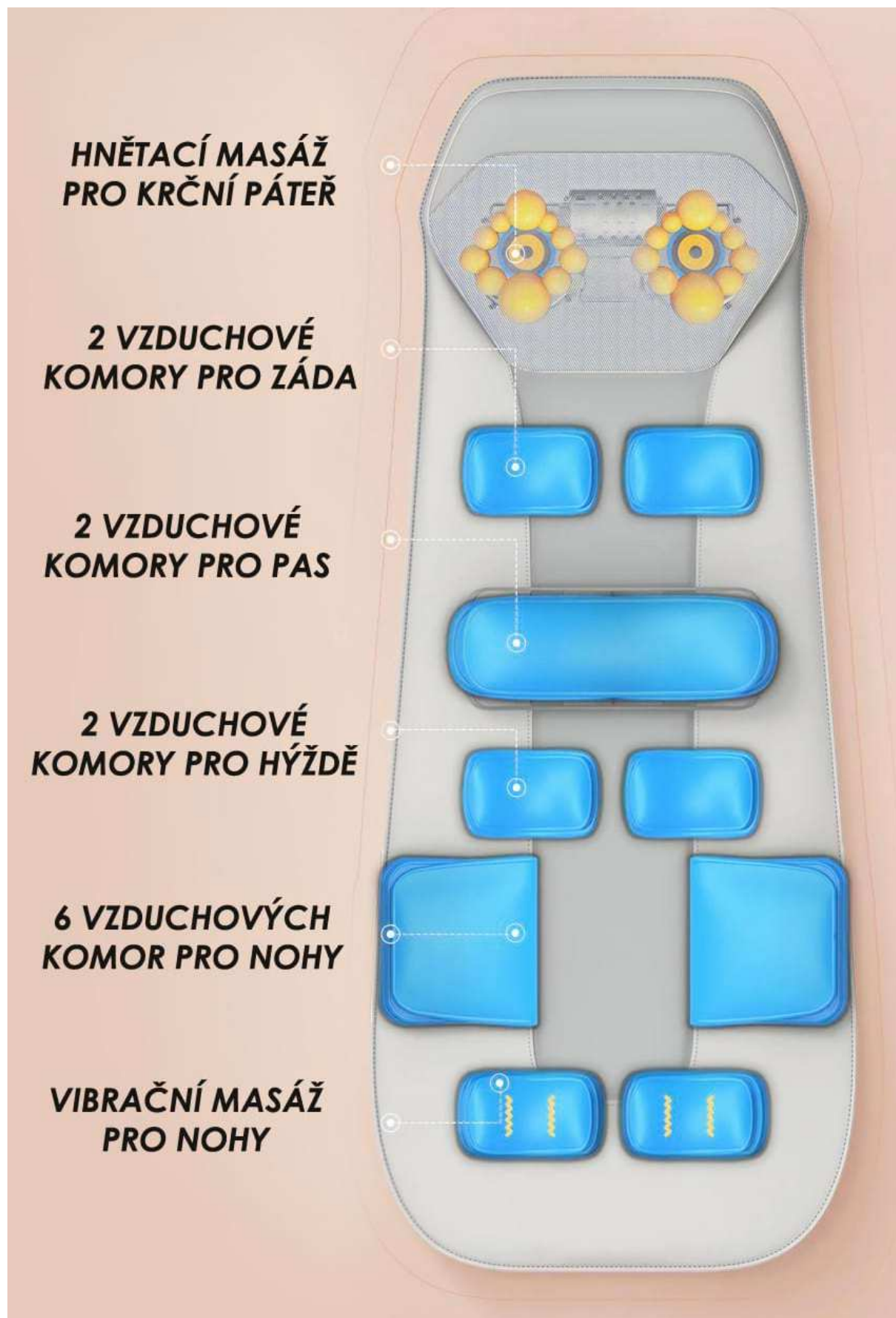



**20 MASÁŽNÍCH BODŮ  
VE 2 APLIKAČNÍCH HLAVICÍCH**  
DVA SMĚRY POHYBU MASÁŽE











## **FLEXIBILNÍ POHYBLIVÁ ČÁST PRO OBLAST BEDER**



## **DVOUVRSTVÁ STREČOVÁ TKANINA S VYSOKOU HUSTOTOU**



## **OBSAH BALENÍ**

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-2954 AIRFLOW REHABBODY LUXURY
- Napájecí adaptér 220V
- Návod k obsluze


## **HLAVNÍ VÝHODY**

- Shiatsu masáž, vzduchová kompresní masáž a vibrační masáž
- Příjemná relaxační masáž pro uvolnění zatuhlých svalů
- Ideální pro použití na oblast krku, ramen, bederní páteře nebo nohou
- Vysoce účinná Shiatsu masáž simuluje pohyby rukou maséra
- Dvě masážní hlavice složené z menších hlavic, které nahrazují skutečné prsty maséra
- Časovač
- Velmi příjemný materiál na dotyk
- Přístroj je možné snadno složit.
- Výkon: 36W
- Napájení: síťovým adaptérem 220V
- Rozměry: 170x60x10cm
- Hmotnost: 8kg




## POPIS PŘÍSTROJE

1. Vibrace pro lýtka
2. Vzduchová masáž pro nohy
3. Vzduchová masáž pro boky
4. Vzduchová masáž pasu
5. Krční masáž

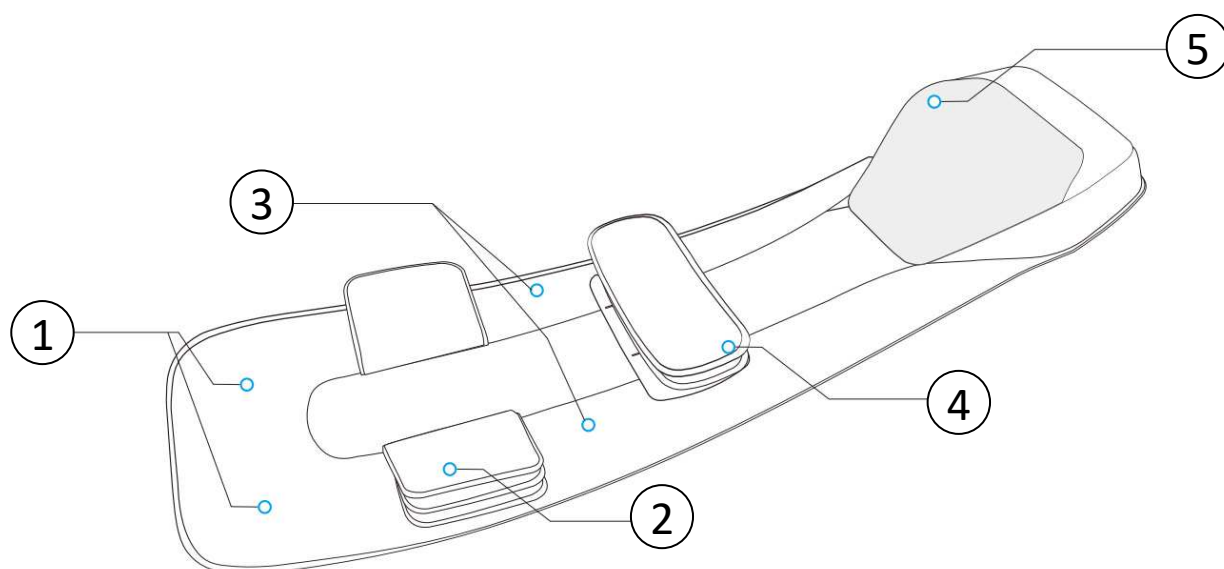

## POPIS OVLADAČE

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **VIBRACE**
3. Tlačítko **VZDUCHOVÁ MASÁŽ AUTO**
4. Tlačítko **VZDUCHOVÁ MASÁŽ MANUAL**
5. Tlačítko **HNĚTENÍ**
6. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
7. Tlačítko **INTENZITA**
8. Tlačítko **ČASOVAC**

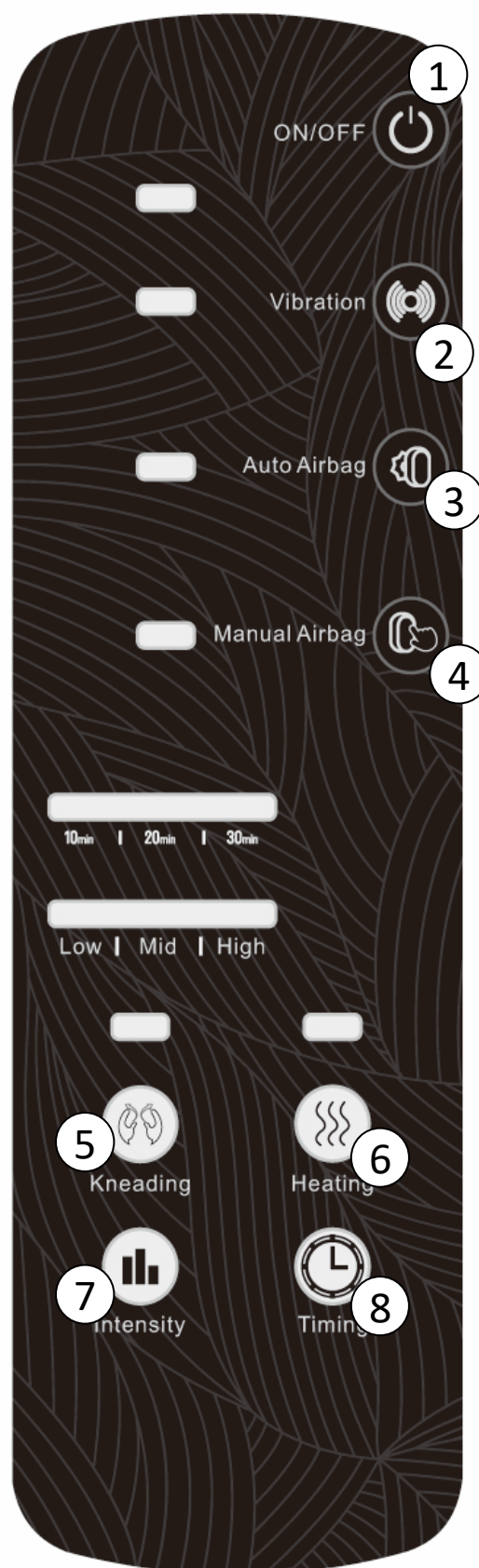

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Všechny funkce přístroje si můžete snadno nastavit pomocí tlačítek na ovladači.
- 2.** Pro zapnutí přístroje použijte tlačítko **ON/OFF**.
- 3.** Pomocí tlačítka **VIBRATION** aktivujete funkci vibrací. K dispozici jsou tři programy působení vibrací. Jakmile svítí červená kontrolka, vibrace jsou vypnuty.
- 4.** Pomocí tlačítka **AUTO AIRBAG** aktivujete vzduchovou masáž dle automatického programu. K dispozici jsou 3 automatické programy. Jakmile svítí červená kontrolka, program je vypnutý. Každý program mění působení vzduchové masáže automaticky. Zvolte si ten, který vám nejvíce vyhovuje.
- 5.** Pomocí tlačítka **MANUAL AIRBAG** si můžete nastavit působení vzduchové masáže ručně. Každý program postupně působí ve vybrané části těla – pas, boky nebo nohy.
- 6.** Tlačítko **KNEADING** aktivuje hnětací masáž na krku.
- 7.** Tlačítko **HEATING** aktivuje funkci vyhřívání.
- 8.** Tlačítko **INTENSITY** aktivuje změnu intenzity masáže. K dispozici jsou tři úrovně - **nejvyšší, střední a nízká**.
- 9.** Pomocí tlačítka **TIMING** si můžete nastavit čas masáže. K dispozici jsou časy 10, 20 a 30 minut.
- 10.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

## **POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE**

- 1.** V průběhu používání přístroje můžete průběžně měnit různé nastavení přístroje. Aktivujte si ty funkce, které jsou vám pro relaxaci těla příjemné.
- 2.** Doporučená délka masáže je maximálně 30 až 40 minut v jednom dni.
- 3.** Přístroj můžete používat vsedě nebo vleže.
- 4.** Přístroj nepoužívejte v automobilu za jízdy. Vždy zastavte na bezpečné místo a poté relaxujte.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## EU DISTRIBUTOR

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## **Masážní přístroj AIRFLOW REHABBODY LUXURY**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2954**

EAN: **8594166122338**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

**EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015  
EN 62233:2008**

Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů  
na vybraných částech těla.

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Při komerčním použití je třeba klást důraz na hygienu provozu přístroje.

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

**Přístroj není zdravotnický prostředek.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno  
Dne: 1.9.2023