

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na vakuovou drenáž  
**BeautyRelax model BR-2819**

## VACUFORM PROFESSIONAL





## OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
KONTRAINDIKACE	6
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	7
LOKÁLNÍ MASÁŽ PODTLAKEM	8
VIBRACE	8
MIKROPROUD	8
FOTONOVÁ TERAPIE	8
HLAVNÍ VÝHODY	10
CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT	11
TECHNICKÉ PARAMETRY	12
OBSAH BALENÍ	12
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	13
PRŮMĚRY APLIKAČNÍCH HLAVIC	15
POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY - ČELNÍ STRANA	16
POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY - ZADNÍ STRANA	17
INSTALACE PŘÍSTROJE - TLAČÍTKO ON/OFF	18
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ FILTR	18
POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH KABELŮ	19
SCHÉMA ZAPOJENÍ	20
MASÁŽ ŇADER	22
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	23
POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE	24
JAK PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT	25
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	27
VÝBĚR PLOCHÉ APLIKAČNÍ HLAVICE	28
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	28
RYCHLOST POHYBU PO PLETI	28
DÉLKA OŠETŘENÍ	29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	29
ZBARVENÍ PLETI	29
SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE	30
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	31
PÁR VĚT ZÁVĚREM	32
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	33
CERTIFIKACE	33
DOVOZCE	33
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	34

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Vacuform Professional je estetický masážní přístroj na vakuovou drenáž. Vysoká variabilita použití díky 27 vyměnitelným aplikačním hlavicím. Určeno pro použití na celé tělo. Technologicky pokročilé aplikační hlavice s technologií vakuového sání, vibrací, mikroproudu a červeného světla. Efektivní podpora krevního oběhu a činnosti lymfatického systému. Možnost plynulého dávkování výkonu. Hlavní jednotka má velký barevný grafický displej. Snadné nastavení všech parametrů masáže. Účinný nástroj v boji proti celulitidě. Konstrukce přístroje vydrží náročný provoz s vysokou frekvencí používání. Dlouhá životnost všech komponentů přístroje.



## UPOZORNĚNÍ

- před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod k použití
- přístroj nepoužívejte v prostředí, kde se nachází přítomnost kouře, prachu, nečistot nebo tam, kde by mohl přístroj spadnout do vody
- dodržujte přesně délku a způsob ošetření
- pokud se budete během používání cítit jakkoliv nestandardně, přístroj vypněte a jeho použití zkonzultujte se svým lékařem
- kabel adaptéru neohýbejte; na přístroj nepokládejte ostré, těžké nebo vlhké předměty
- během používání přístroje se vyhýbejte kontaktu s předměty, jako jsou svíčky, cigarety, lihoviny
- pokud bude mít přístroj jakékoliv technické problémy, využijte kontaktní formulář na adrese [www.beautyrelax.cz](http://www.beautyrelax.cz)
- přístroj se nepokoušejte sami rozebírat ani opravovat – mohli byste se zranit a došlo by ke ztrátě záruky
- pokud nastane některá z těchto situací, přístroj nikdy nepoužívejte:
  - napájecí kabel je poškozen
  - do elektroniky přístroje vnikla voda (týká se to zejména displeje)
  - na přístroj spadl těžký předmět nebo spadl z velké výšky na zem
- přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti jiného elektrického zařízení
- pokud přístroj používá více osob, aplikační hlavici dezinfikujte po každém použití pomocí jemně navlhčené hadříčky v lihovém roztoku



## KONTRAIKACI

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Při stavu vysokých horeček
- Závažné kožní onemocnění na oblasti použití přístroje
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Cévní poruchy nebo arteroskleróza
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



***Doporučení:** Masážní přístroj Vacuform Professional má vliv na činnost lymfatického systému a krevního oběhu. Pokud máte zdravotní diagnózu se špatnou funkcí lymfatického systému, srdečním onemocněním, případně trpíte zvýšeným krevním tlakem, konzultujte první použití přístroje s vaším lékařem.*

## ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



## PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Masážní přístroj VACUFORM PROFESSIONAL nabízí prostřednictvím aplikačních hlavice hned několik technologií. Základem je působení vakua, které zajišťuje vzduchové čerpadlo integrované do hlavní jednotky přístroje. Součástí balení je 6 oranžových speciálně navržených aplikátorů tak, aby poskytovali více technologií najednou. Jsou určeny pro použití na ňadra nebo hýždě. Konstruktivní řešení zajišťuje hned několik technologií najednou: vakuum, vibrace, červené světlo a mikroproud. Masážní přístroj VACUFORM PROFESSIONAL je vysoce sofistikovaný výkonný nástroj pro intenzivní potlačení projevů celulitidy. Skutečně funkční podtlaková vakuová drenáž. Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie. Zcela neinvazivní charakter ošetření. K dispozici je celá řada nastavení: úroveň působení mikroproudu, úroveň působení síly podtlaku. Projevy pomerančové kůže nemají proti modelu VACUFORM PROFESSIONAL žádnou šanci!




## LOKÁLNÍ MASÁŽ PODTLAKEM

Lymfatická masáž patří mezi nejučinnější způsoby pro redukcí projevů celulitidy. Rytmičké hnětení svalů zajišťuje správné proudění lymfy v těle. Přispívá k odvádění nečistot z krve. Prostřednictvím podtlakové terapie lze tělo zbavit nežádoucích otoků a nevzhledně vypadající pomerančové kůže.



## VIBRACE

Působení vibrační zlepšuje krevní oběh. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti.

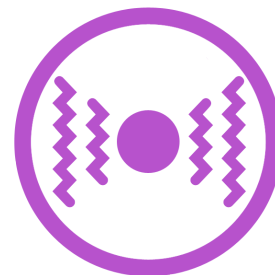


## MIKROPROUD

Působením času svaly ztrácí přirozenou pružnost a elasticitu. Pleť působí fádáním a unaveným dojmem. Kontaktní plocha oranžových aplikátorů generuje působení mikroproudu. Pulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo ke svalům. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů. Na hlavní jednotce si můžete nastavit až 10 úrovní intenzity.



## FOTONOVÁ TERAPIE ČERVENÉ SVĚTLO

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

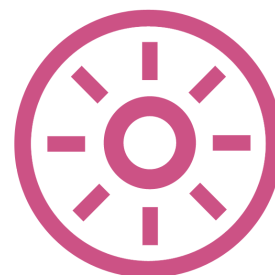

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.



## REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

### ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.



## HLAVNÍ VÝHODY


- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie.
- Účinné potlačení příznaků celulitidy.
- Pokožka je pružnější a jemnější na dotyk.
- Tvarování a zpevňování vybraných partií těla.
- Skutečně funkční podtlaková masáž.
- Populární metoda masáže pomocí baňkování.
- Přispívá k okysličení krve.
- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bezpečné, bezbolestné používání.
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Zmírnění únavy.
- Uvolňování podtlaku v baňce probíhá automaticky pomocí vzduchového kompresoru v hlavní jednotce.
- Oblast použití: tvář, podbradek, ňadra, paže, břicho, boky, stehna, hýždě, lýtka.



*Klasická metoda baňkování bez použití elektroniky*

## CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT

- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie
- Pokožka je pružnější a jemnější na dotyk
- Při pravidelném používání a přiměřeném stravování zjemnění příznaků celulitidy
- Tvarování a zpevňování stehen, hýždí, břicha

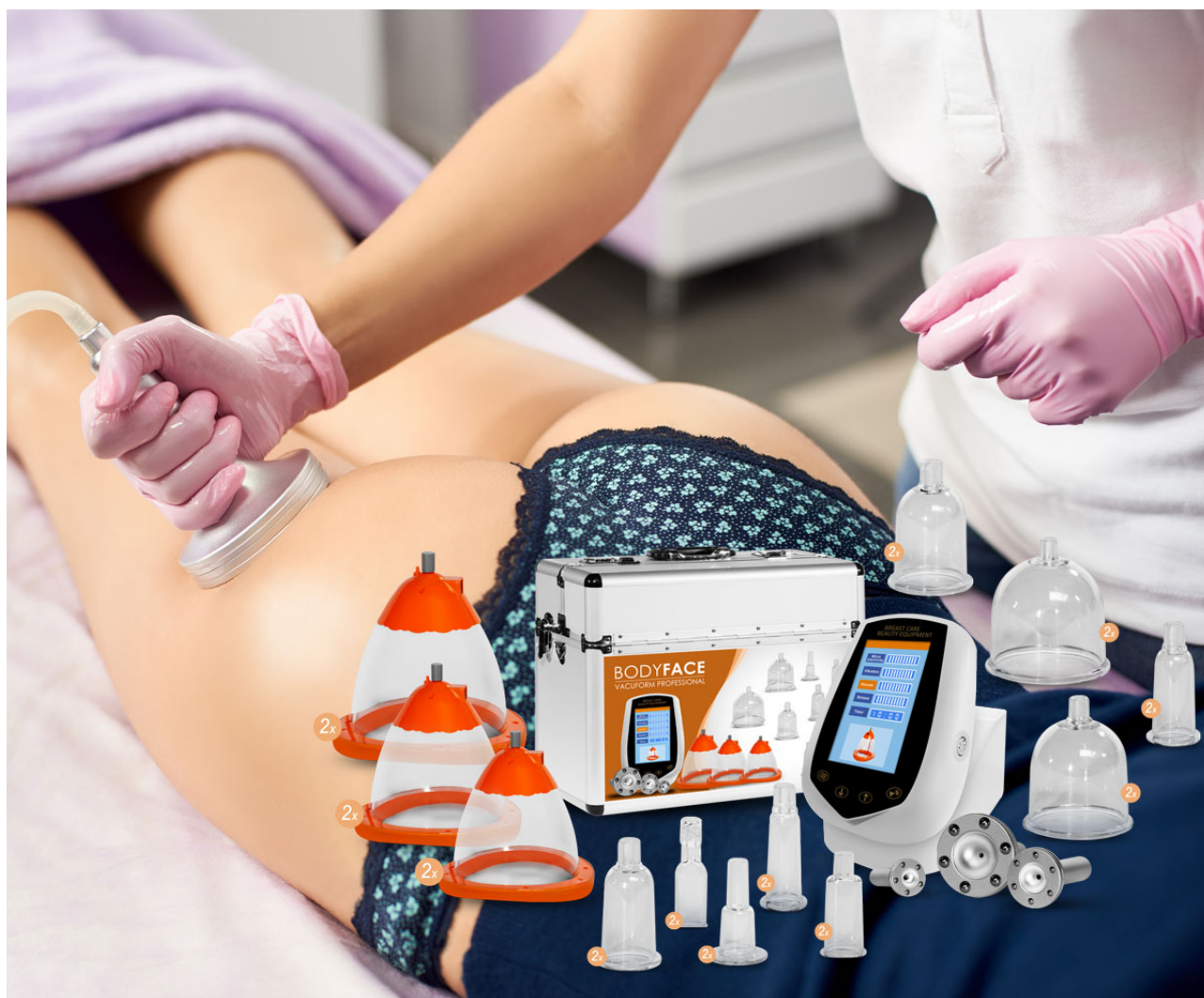

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- K dispozici na výběr až 27 aplikačních hlavíc.
- Nastavení výkonu vibrací: 10 úrovní.
- Nastavení výkonu mikroproudu: 10 úrovní.
- Nastavení délky tvorby podtlaku: 10 úrovní.
- Nastavení délky uvolnění podtlaku: 10 úrovní.
- Časovač: ano, až 30 minut.
- Provozní napětí: 12V.
- Provozní proud: 3A.
- Výkon: 36W.
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V.
- Rozměry hlavní jednotky: 18x16x9cm.
- Hmotnost sady: 5kg.

## OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-2819
- 6x Velká aplikační hlavice pro hýždě a ňadra
- 8x Střední aplikační hlavice pro větší partie těla
- 10x Malá aplikační hlavice pro obličej nebo malé partie těla
- 3x Kovové aplikační hlavice s masážními kuličkami
- 3x Vzduchový kabel
- 1x Kovový kufřík
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Sonogel
- 1x Prodlužovací kabel s hlavním spínačem
- 1x Návod k obsluze



## **POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC**

Balení obsahuje celkem 27 vyměnitelných aplikačních hlavice různých velikostí a průměrů.

### ***Velké aplikační hlavice pro hýždě a řadra: 6ks***

Vakuová terapie, vibrace, mikroproud a červené světlo.

Průměry hlavice: 1 hlavice 18cm, 1 hlavice 16cm, 1 hlavice 14cm.



### ***Střední aplikační hlavice pro větší partie těla: 8ks***

Průměry hlavice: 2 hlavice 8,4cm, 2 hlavice 6,3cm, 2 hlavice 4,3cm, 2 hlavice 3,3cm.



**Malé aplikační hlavice pro obličej nebo malé partie těla: 10ks**

Průměry hlavice: 2 hlavice 2,9cm, 2 hlavice 2,3cm, 2 hlavice 1,8cm, 2 hlavice 3,3cm.



**Kovové aplikační hlavice s masážními kuličkami: 3ks**

Průměry hlavice: 1 hlavice 7,4cm, 1 hlavice 5,2cm, 1 hlavice 3,1cm.



## PRŮMĚRY APLIKAČNÍCH HLAVIC



## POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY - ČELNÍ STRANA

1. Intenzita působení mikroproudu
2. Intenzita působení vibrací
3. Délka působení vakua (podtlaku) v sekundách
4. Délka uvolnění vakua (podtlaku) v sekundách
5. Časovač (0 až 30 minut)
6. Výběr položky v menu
7. Tlačítko START/PAUZA
8. Tlačítko SNÍŽENÍ hodnoty
9. Tlačítko ZVÝŠENÍ hodnoty
10. Konektor pro oranžové hlavice






## POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY - ZADNÍ STRANA

1. Vstup pro konektor napájecího adaptéru
2. Analogové tlačítko pro nastavení intenzity působení vakua
3. Konektor pro připojení vzduchového kabelu
4. Kazeta se vzduchovým filtrem
5. Mřížka ventilátoru - NIKDY NEZAKRÝVEJTE



## INSTALACE PŘÍSTROJE - TLAČÍTKO ON/OFF

Na těle přístroje není umístěno hlavní tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje. K zapnutí/vypnutí přístroje použijte tlačítko, které se nachází na prodlužovacím kabelu, který je součástí balení. Po skončení používání přístroje doporučujeme vyčkat 5 až 10 minut, aby měl ventilátor možnost elektroniku přístroje ochladit před vypnutím přístroje. Přístroj pak kompletně vypněte pomocí hlavního spínacího tlačítka, které je umístěné na prodlužovacím kabelu (součástí balení).

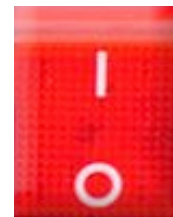

## INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ FILTR

Na zadní straně přístroje se nachází průhledná kazeta, kde je umístěn hlavní vzduchový filtr bílé barvy. Filtr je zodpovědný za to, aby se do vzduchového systému napojeného k čerpadlu nedostaly žádné nečistoty. Filtr je bezúdržbový. Není třeba ho měnit. Jednou za dlouhý čas můžete provést kontrolu filtru. **(1)** Vysuňte spodní část kazety ve směru modré šipky. **(2)** Odšroubujte šroubek dle označení fialového kroužku. **(3)** Filtr ručně oprašte a vraťte nazpět na své místo. **(4)** Zašroubujte šroubek na zpět. **(5)** Spodní část kazety zasuňte nazpět. Pokud budete potřebovat náhradní vzduchové filtry, kontaktujte prosím prodejce.




## POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH KABELŮ


Součástí balení jsou 3 typy vzduchových kabelů. Umožňují propojit hlavní jednotku se všemi druhy aplikačních hlavic, které máte k dispozici pro použití. Při zapojení vzduchových kabelů vždy dbejte na to, aby byl zasunutý do aplikátoru nadoraz. Zajistíte tak, aby se hadice v průběhu použití působením tlaku vysunula.




*Používá se jednotlivě*

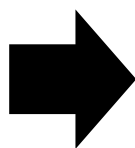

*Používá se v páru*

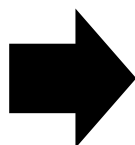

*Používá se v páru*

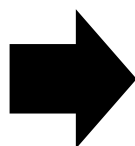

## SCHÉMA ZAPOJENÍ

Při zapojení oranžových aplikátorů zvolte správný typ vzduchové hadice. Jeden konec hadice připojte k hlavní jednotce ze zadní strany. Kabel je speciálně upraven tak, aby umožnil připojení obou hlavic najednou. Kromě vzduchového kabelu nezapomeňte také připojit druhý typ kabelu, který se k aplikačním hlavicím připojuje z boční strany. Vstup pro tento kabel je na hlavní jednotce také z boční strany. Pro správnou činnost je třeba zapojit vždy oba aplikátory najednou.





## MASÁŽ ŇADER

Masážní přístroj lze používat na masáž prsních svalů. Zde prosím dbejte zvýšenou pozornost nastavení síly vakuového sání. Stejně tak pracujte s citem při nastavení výkonu mikroproudu. Prsní sval je orgán se zvýšenou citlivostí na dotyk. Vyberte velikost oranžového aplikátoru, která vám bude nejvíce vyhovovat. Pro masáž poprsí používejte výhradně bodovou masáž.



- Při použití si zvolte vhodnou velikost aplikační hlavice.
- Oranžové aplikační hlavice jsou určena pro ňadra a hýždě.
- Aplikátory pracují staticky. Při použití na dané partii s nimi nehýbejte.
- Při použití těchto hlavic naneste mírnou vrstvičku sonogelu po obvodu kontaktní plochy hlavice.
- Sonogel zvýší vodivost pleti, což je příznivé zejména při použití funkce mikroproudu.

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Napájecí kabel přístroje připojte k prodlužovacímu kabelu, který je součástí balení. Prodlužovací kabel připojte k elektrické síti.
- 2.** Pomocí tlačítka **ON/OFF** na prodlužovacím kabelu přístroj zapnete.
- 3.** Po zapnutí přístroje se aktivuje se displej. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. V pohotovostním režimu si můžete zapojit typ vzduchového kabelu a aplikační hlavice podle účelu použití přístroje.
- 4.** Pomocí tlačítek **SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ** si můžete nastavit intenzitu působení mikroproudu (Micro elektricity). K dispozici je celkem 10 úrovní.
- 5.** Pomocí tlačítek **SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ** si můžete nastavit intenzitu působení vibrační masáže (Vibration). K dispozici je celkem 10 úrovní.
- 6.** Pomocí tlačítek **SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ** si můžete nastavit čas působení vakuové masáže (Vacuum). K dispozici je rozsah nastavení 1 až 10 sekund.
- 7.** Pomocí tlačítek **SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ** si můžete nastavit čas uvolnění vakua v aplikátoru (Release). K dispozici je rozsah nastavení 1 až 10 sekund.
- 8.** Pomocí tlačítek **SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ** si můžete nastavit čas použití přístroje (Timer). K dispozici je rozsah nastavení 1 až 30 minut. Po uplynutí času se přístroj nachází v pohotovostním režimu.
- 9.** Pomocí tlačítka **START/STOP** aktivujete činnost přístroje.
- 10.** Před samotným vypnutím přístroje doporučujeme přístroj nechat zapnutý v průběhu několika minut. Přístroj má tak možnost ochladit elektronické součástky uvnitř přístroje.
- 11.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí hlavního tlačítka **ON/OFF** na prodlužovacím kabelu.

## **POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE**

- 1.** Aplikační hlavice přístroje nepoužívejte nikdy na sucho. Vždy na pleť aplikujte jakýkoliv masážní olej nebo krém. Cokoliv, co umožní, aby aplikační hlavice po pleti dobře klouzala. Ideální je olejček. Na pleti vysychá pomalu a má skvělou konzistenci.
- 2.** Při nastavení výkonu postupujte vždy se zvýšenou opatrností. Vždy nastavte nejprve úroveň 1. Přidávejte postupně podle vašeho pocitu. Technologie přístroje musí být na pokožce cítit. Přesto by používání přístroje nemělo překročit mez, kdy už to pro vás nebude snesitelné. Platí to především pro technologii mikroproudu u velkých oranžových aplikátorů.
- 3.** Při použití oranžových aplikátorů není třeba mít všechny funkce zapnuté. Můžete mít bez problémů zapnuté pouze vakuové sání. Funkci mikroproudu, vibrací nebo červeného světla.
- 4.** Čím více nastavíte výkon vakuového sání, tím intenzivněji bude na vaši pleti probíhat mechanická podtlaková masáž. O to více mohou na vaši pleti zůstat stopy v podobě zarudnutí, které může v krajním případě přejít až v lehké podlitiny. V případě zarudnutí se pleť dostane do normálu v řádu hodin. Pokud zarudnutí přejde v podlitinu modré barvy, návrat do normálu vezme několik dní. Proto je vždy na každém uživateli, jaké individuální nastavení přístroje zvolí.
- 5.** Než se s přístrojem podrobně seznámíte a získáte jistou zkušenost, provádějte po těle krátké táhlé pohyby. Vybranou partii je možné také ošetřit staticky - s přístrojem zůstanete na jednom místě a necháte tukovou tkáň přístrojem nasát po delší dobu. Čím delší čas je přístroj k tukové tkáni nasátý, tím se více projeví zarudnutí až modřiny. Tento efekt snížíte přidáním masážního oleje nebo snížením úrovně působení vakuové masáže.



## JAK PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT

- Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat ošetření po celkové koupeli těla. Pleť je krásně zahřátá a vláčná.
- Naneste na partii, kterou chcete ošetřit, jemnou vrstvu pleťového krému, krému proti celulitidě nebo jakýkoliv druh **esenciálního masážního oleje** (doporučujeme spíše přípravek na olejové bázi). Hlavním důvodem je lepší pohyb masážní hlavice po těle. Během masáže mají navíc tyto přípravky mnohem lepší schopnost absorbování do podkožní tkáně. **Bez podobného přípravku přístroj NEPOUŽÍVEJTE.**

### pohybová masáž


Přístrojem se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí krému nebo oleje. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho.** Při pohybové masáži je důležité nastavit **sílu nasávání na co nejmenší úroveň.** Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, s přístrojem už nebude možné pohnout. Rychlost pohybu hlavice po pleti upravte podle nastaveného výkonu vakuové masáže.

### bodová masáž

Bodová masáž spočívá v ošetření konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapněte a přiložte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po ošetření pleť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při ošetření ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

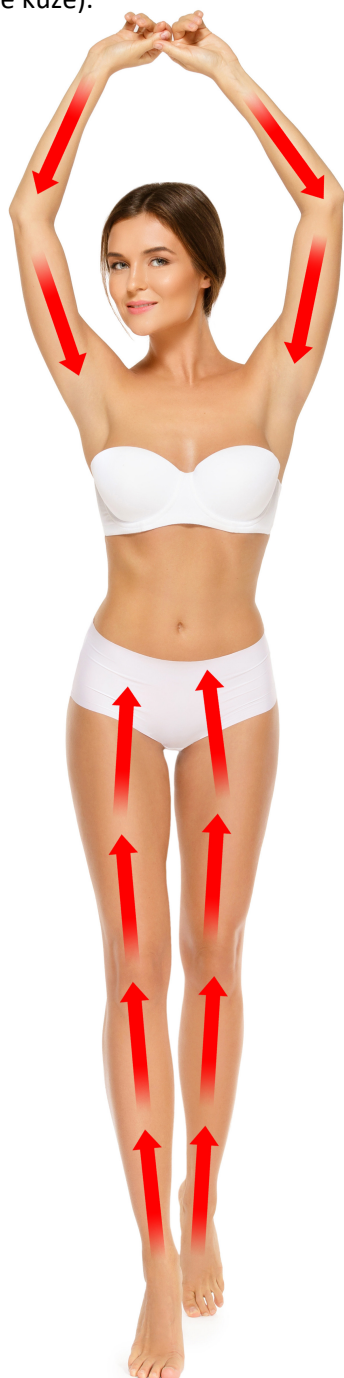

pohybová masáž



bodová masáž


## POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- obličej
- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



## VÝBĚR PLOCHÉ APLIKAČNÍ HLAVICE

Součástí balení jsou také 3 vyměnitelné aplikační hlavice. Jsou vyrobeny z kovu pro udržení dlouhé životnosti. V každé aplikační hlavici jsou integrované kuličky pro mechanickou masáž a lepší pohyb hlavice po pleti. Aplikační hlavici vyberte podle velikosti tělesné partie, na kterou se chcete při ošetření zaměřit.

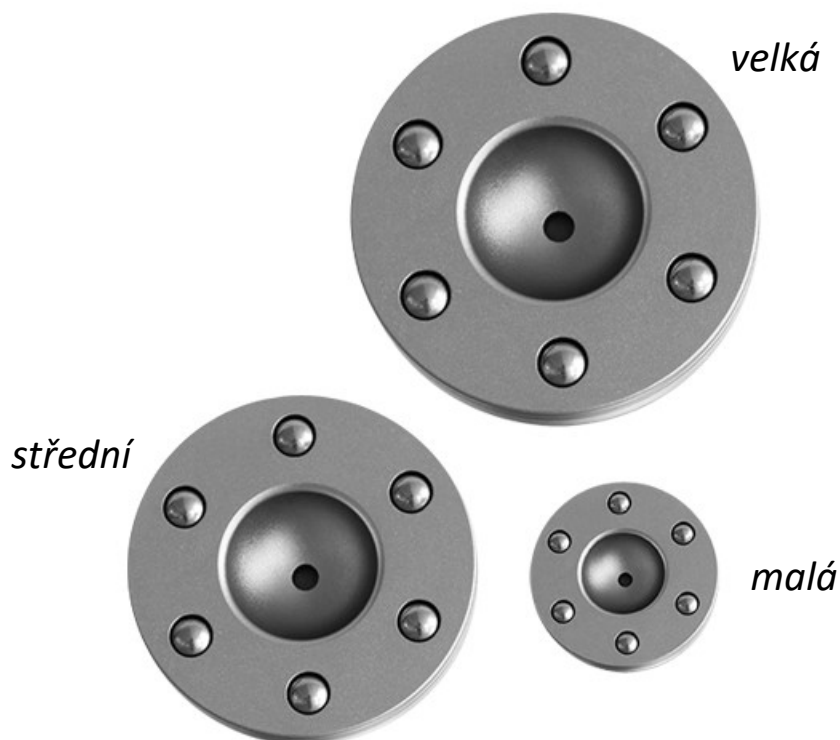

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Masážní přístroj dosahuje poměrně velkého výkonu. Ten i můžete snadno nastavit pomocí ovládacího panelu. K dispozici je na výběr široký rozsah výkonu, který si můžete nastavit pomocí otočného kolečka. I v případě použití nejnižšího výkonu může být při delším nasátí komplikovanější opět aplikační hlavici z pokožky odstranit. Nejlepší metoda je šikmé naklonění hlavice. Při kolmém směru by se odpojení hlavice od pokožky mohlo jevit jako problematické.

## RYCHLOST POHYBU PO PLETI

Jednou z masážních technik použití přístroje je tzv. razítkování. Metoda spočívá v nasátí aplikační hlavice pokožky na jednom místě. Poté se aplikační hlavice odstraní a stejný proces provedete o kousek vedle. Rozpojení aplikační hlavice s pletí je nejlépe provádět šikým náklonem. Při používání masážního přístroje je třeba zohlednit působení vakuového nasávání v čase. S délkou kontaktu aplikační hlavice s pletí na jednom místě vakuové nasátí postupně graduje (při nastavení libovolného výkonu). Pokud se s hlavicí přístroje budete pohybovat po pleti v rychlejších táhlých pohybech, gradování působení vakua v případě stání na jednom místě výrazně eliminujete. Jednoduše řečeno. Při rychlejším pohybu hlavice po pleti se vám bude pohyb provádět snadněji, avšak s nižší mírou působení vakua. Znovu zdůrazňujeme, že je vždy třeba plet dostatečně hydratovat. Ideálně masážním olejíčkem. Pokud pokožku dostatečně „promažete“, má to na komfort použití přístroje zcela zásadní vliv.

## DÉLKA OŠETŘENÍ

Pro každou partii je doporučeno ošetření v maximální délce 15 až 20 minut. Ošetření partií můžete libovolně kombinovat. Je vhodné rozložit si masáž těla do celého týdne. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.). Určitě nedoporučujeme ošetření přístrojem stejnou partii každý den.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití vnitřek aplikátoru důkladně očistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Zejména, pokud přístroj používá více osob. Jednou za čas je dobré provést kompletní čištění vnitřního systému přístroje.

## ZBARVENÍ PLETI

Působením podtlakové masáže mohou na pleti vznikat červené fleky až téměř podlitiny (v případě použití opravdu silného výkonu podtlakové masáže). Jedná se o zcela přirozený jev. V průběhu několika hodin (v závislosti na výkonu podtlakové masáže) zbarvení pleti postupně zmizí. V případě nejvyšších hodnot podtlakové masáže se mohou červené fleky proměnit až v modřiny. V tomto případě trvá návrat do přirozené barvy pleti déle.



## SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE

Boj s celulitidou představuje běh na dlouhou trať. Přesto však existují účinné technologie, které z dlouhodobého hlediska napomáhají k potlačení projevů pomerančové pleť. Optimální je kombinace ultrazvukové kavitace a podtlakové vakuové drenáže. Ultrazvuk se aktivně zaměřuje na stimulaci tukových buněk. Vakuová drenáž stimuluje vhodným způsobem krevní oběh a lymfatický systém. V masážních salonech se jedná o běžný postup ošetření. V první fázi ošetříte vybranou partii ultrazvukem a ve druhé fázi vakuovou drenáží. Účinek působení ultrazvuku je tak maximálně podpořen.



### BEAUTYRELAX 3V1



### CAVIMAX



### CAVIMAX OPTIMAL



### CELLUFORM



### CELLUFORM ULTIMATE



### CAVIMAX ULTIMATE

## **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?**

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro vakuovou masáž přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

### **Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?**

Minimálně 4 hodiny před ošetřením nejzte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvyšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel.

### **Bolí ošetření masážním přístrojem?**

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné. Při nastavení síly vakuového sání vždy začínejte na nejnižší hodnotě.

### **Mohu používat masážní přístroj bez předchozího ošetření pokožky?**

Před použitím masážního přístroje je nezbytné nanést na pokožku jakýkoliv typ pleťového krému nebo oleje. Jednoduše vytvořit kontaktní vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Pohyb aplikátoru bude mnohem snadnější. Navíc se účinné látky z krémů a olejů účinně vmasírují do podkoží.

### **Co mohu od používání masážního přístroje očekávat?**

Pravidelným používáním bude vaše pokožka pevnější a hladší zejména v oblastech postižené negativním působením celulitidy. Při celulitidě dochází k zvětšení objemu podkožních tukových buněk, které jsou vytlačovány proti povrchu kůže, a vytváří tak na ní nevzhledné dloíčky, připomínající právě strukturu pomerančové kůry. Masáž přístrojem zlepší proudění mízy k odvádění nečistot z krve. Pomocí této jemné techniky lze zbavit tělo otoků a vyřešit tak zdravotní problémy, kterým by klasická sportovně-rekondiční masáž spíše uškodila.

### **Je používání masážního přístroje bezpečné?**

Masážní přístroj nemá žádné ostré hrany. Neměl by vás jakýmkoliv způsobem zranit. Dbejte však zvýšenou pozornost nastavení síly vakuového sání. Začítejte na nízkých hodnotách a postupně navyšujte dle vašeho pocitového vnímání. Zvýšená intenzita sání může způsobit mírné otoky až modřiny, které by měli během hodin až dní zmizet. Po dokončení ošetření může pokožka zrudnout. Tento efekt však také sám zmizí.

### **Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?**

Aplikátor je třeba po použití důkladně očistit. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu. Platí to zejména v případě, kdy je přístroj používán více osobami.

### **Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?**

Doporučená délka ošetření jedné partie by měla být v rozsahu od 10 do 15 minut. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.).

**V jakých případech přístroj nepoužívat?**

V tomto návodu k obsluze je v pasáži „kontraindikace“ uveden seznam zdravotního omezení, kdy přístroj není možné používat. Dbejte prosím zvýšenou pozornost na případné kožní defekty. Věnujte pozornost dokončení léčby. Poté není problém přístroj znovu používat.

**Je přístroj zdravotnický prostředek?**

Nikoliv. Spadá do kategorie masážních přístrojů.

**Může přístroj používat více osob?**

Ano, je to možné. Pakliže je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavičky, druhá osoba přístroj použít může.

## PÁR VĚT ZÁVĚREM

Metoda masáže těla pomocí baněk se používá celou řadu let. Jeho blahodárné účinky na tělo jsou všeobecně známy. Přístroj VACUFORM PROFESSIONAL posouvá tuto metodu masáže na jinou dimenzi použití. Elektronická vzduchová pumpa přečerpává vzduch do aplikačních baněk přesně podle vaší individuální potřeby. Může se nastavit intenzitu vakua, délku nasávání, délku uvolnění. U vybraných technologicky pokročilých oranžových baněk jsou další doplňující technologie - červené světlo, vibrace a mikroproud. Osobně na modelu VACUFORM PROFESSIONAL oceňuji velký počet aplikačních baněk. Snadno se tak můžete zaměřit na velké i malé partie. Model bych doporučil každému, kdo má rád, když se klasika snoubí s moderní technologií. Každému, kdo vidí v baňkování velmi účinnou metodu v péči o tělo.



Martin Hrbek

[www.beautyrelax.cz](http://www.beautyrelax.cz)



## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

## **Masážní podtlakový přístroj VACUFORM PROFESSIONAL**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2819**

EAN **8594166120556**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

**EN 60601-1-2:2007**

**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009**

**EN 61000-3-3:2008**

**EN 60601-1:2006+A11:2011**

**EN 60825-1:2007**

### **Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno  
Datum vydání: 1.6.2022

  
**SANTADRIA s.r.o.**  
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno  
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel